

EDにお悩みの方に

Vigor

医療機器製造販売承認番号  
30300BZX00279000

手動式可搬型吸引器【ビガー 2020】


管理医療機器  
承認済  
Premium  
Quality

ED診療  
ガイドライン  
掲載商品  
Premium  
Quality

安全性  
試験確認済  
Premium  
Quality

人間工学  
万能デザイン  
簡単操作  
Premium  
Quality

# Vigor

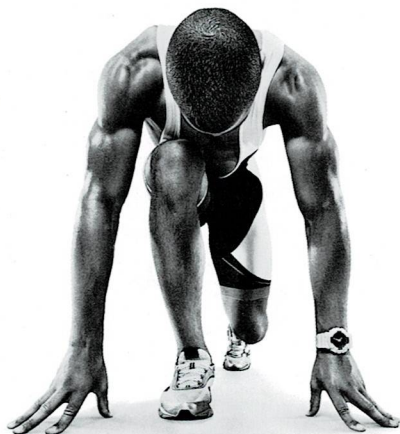


「ビガー2020」は、勃起補助を目的とした管理医療機器です。

一般社団法人日本性機能学会/日本泌尿器学会が発行するED診療ガイドラインに掲載されている手動式可搬型吸引器として使用可能な医療機器です。

吸引によって人為的に海綿体内に血液を呼び込み勃起させ、

付属のリングを使用することにより勃起状態を維持し性行為が可能となります。

ご自宅で性機能のサポート・リハビリテーションでご使用いただけます。

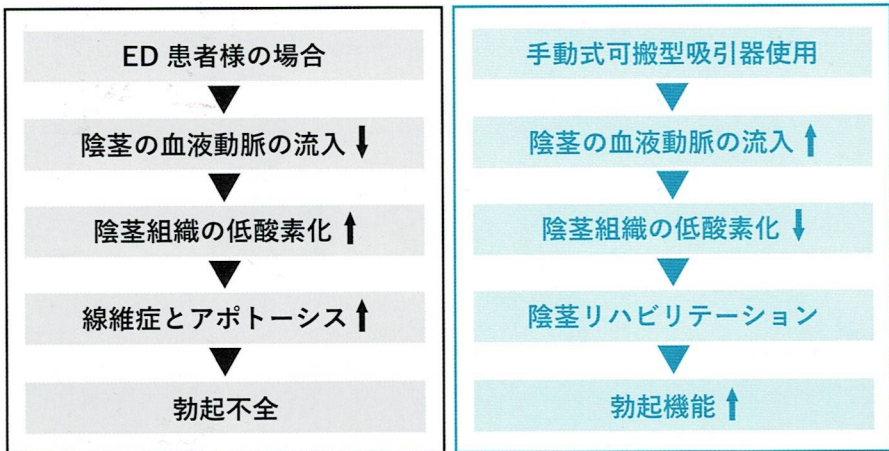

出展：Lin H, Wang G, Wang R. Vacuum erectile device for penile rehabilitation. J Intgr Nephrology Andrology 2014;1:4-10.

# Q&A

## 【Q】 1日何分ぐらいやるべきですか？

A 1日の吸引時間は15分以内が目安です。付属のリングの使用は30分以内に留めてください。

## 【Q】 操作は難しいですか？

A パッキンの穴に当てポンプを数回操作すると亀頭がシリンダー内に入ります。ゆっくりとポンプの操作を繰り返すことにより自然と勃起します。

## 【Q】 今まで事故はないですか？

A ビガー2020で事故の報告はありませんが、海外で泥酔LVCD(真空勃起装置)を使用中に寝込んでしまい皮膚壊死を起こした症例が報告されています。使用する前に取扱い説明書をよく読みご使用ください。

## 【Q】 お風呂場で使って平気ですか？

A お風呂場での使用の制限は特にありませんが、ポンプを水に濡らすことにより故障する可能性がある為、ポンプが濡れないようにご注意ください。

## 【Q】 パッキンが外れない時はどうすればいいですか？

A たっぶりのローションを塗りゆっくりと動かして外してください。どうしても外れない場合は、パッキンを広げてハサミで切り込みを入れて切ってください。

## 【Q】 お手入れは大変ですか？

A 簡単です。水又はぬるま湯でパッキン・リング・シリンダーを洗って乾かしてください。  
※煮沸・直射日光・アルコールは劣化を進めますのでご注意ください。ポンプは乾いた布で拭いてください。

## 【Q】 どれぐらいで良くなりますか？

A ED治療の期間は、2ヶ月間は使用することを推奨しています。

## 【Q】 一旦良くなったら使用を辞めてもいいですか？

A トレーニング・リハビリテーションとして、健康維持のためにも継続して使用をすることをおすすめします。

## 【Q】 保証期間はいつまでですか？

A お買い上げ日より1年間の保証を行なっております。



↑  
使用動画はこちら


# 周辺製品(別売)



## 【フラックス:ローション】 皮膚コンディショニング成分配合


(主要成分)

- ・ヒト脂肪間質細胞エクソソーム
- ・アルギニン
- ・ローマンカモミール

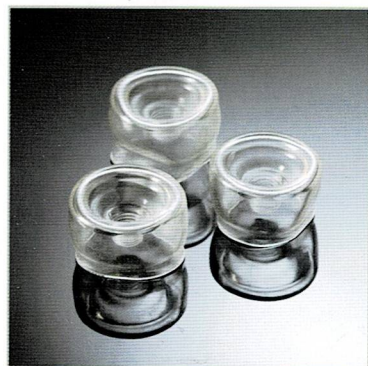

## 【ビガー2020:交換用パッキン】

ビガー2020のパッキンは煮沸・直射日光・乾燥・高温多湿・アルコールに大変弱い材質です。繰り返しの使用で劣化(ひび割れ・伸び)がみられましたら新しいものと交換してください。

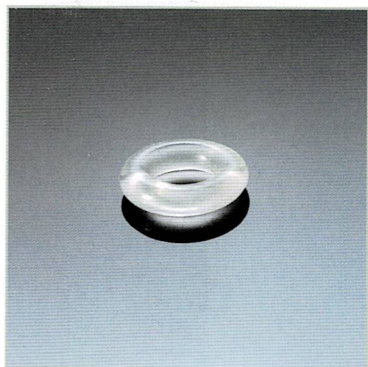

## 【ビガー2020:交換用リング】

ビガー2020のリングは煮沸・直射日光・乾燥・高温多湿・アルコールに大変弱い材質です。繰り返しの使用で劣化(ひび割れ・伸び)がみられましたら新しいものと交換してください。


# EDは突然死する病の前兆

EDは、不妊・自信喪失につながるだけではなく、動脈硬化を原因とする心筋梗塞・脳梗塞・狭心症といった『突然死』に繋がる病の前兆でもありその危険信号を見逃さないことが健康寿命を保つうえでも極めて重要です。

## EDは心血管系疾患の指標

人体の動脈の中で一番細い動脈は陰茎の動脈であることをご存知でしょうか？動脈硬化が始まると最も細い陰茎の動脈は詰まりやすくなりEDとして現れます。他の動脈でも血管障害が顕在化するのには時間の問題と推測されるため早急に治療が必要です。

主な血管病	勃起障害	狭心症 心筋梗塞	脳梗塞 脳卒中	末梢動脈疾患 間欠性跛行
動脈内径	1~2mm 詰まりやすい ←	3~4mm	5~7mm	6~8mm → 詰まりにくい

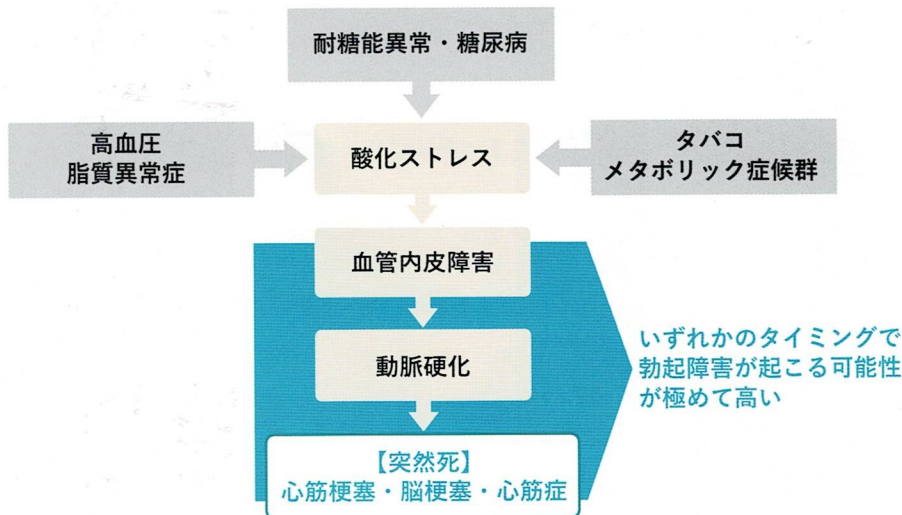

## ビガー2020に関するご質問やご相談は 下記クリニックへご相談ください。

### 【注意喚起】

ビガー2020は、ED患者様の勃起補助を目的として承認されている管理医療機器です。勃起補助に有効性があり、安全性の面から限られた量の圧力が発生するように特別に設計された医療機器です。過度な圧力を陰茎にさらすと陰茎損傷の潜在的リスクがありますので、ED患者様の勃起補助の目的には、当該目的で承認された医療機器をご使用ください。


### 【販売店】

【製造販売元】



株式会社アルテック

【発 売 元】

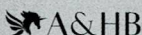

株式会社A&HB

テストステロンで男を上げる

flux


HUMAN  
STEM CELL CULTURE  
BLENDED

MADE IN JAPAN

ビガー 2020 用ローション【フラックス】

ヒト脂肪間質細胞エクソソーム配合  
(皮膚コンディショニング成分)

ローマンカモミール天然香料配合  
(テストステロン向上成分)

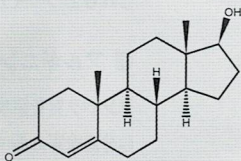

# ビガー 2020 の使用感と成果を高めるために開発されたローション



## フラックス プレミアム エッセンス(スキンローション) 30g


### 【全成分】

水、グリセリン、BG、カルボマー、メチルパラベン、エチルパラベン、水酸化 K、ヒト脂肪間質細胞エクソソーム、PEG-60 水添ヒマシ油、ローマカミツレ花油、イチョウ葉エキス、アルギニン

### 使用方法

- スポイント1~2滴が1回の使用の目安です
- 陰茎全体にやさしくなじませます
- ビガー2020の使用 방법에 則りご使用ください

## 「カラダめぐり」に関わる健康パワーに着目した配合成分

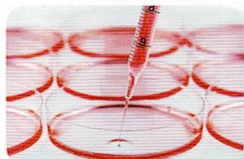

### ■ ヒト幹細胞培養液

脂肪由来の幹細胞を培養し、培養する過程で得られたタンパク質や成長因子などが多く含まれたエキスです。



### ■ ローマンカモミール精油

「心や精神」に作用するとされており、アロマセラピーに使用されています。香りを嗅ぐだけで男性ホルモン（テストステロン）濃度の増加が認められている注目の成分です。



### ■ イチョウ葉エキス

イチョウ葉の健康パワーの源は、植物特有の「フラボノイド成分」と、特有成分ギンコライドを含む「テルペンラクトン類成分」。これら2つの成分がカラダの中で働き合うことで力強く健康をサポートします。

### ■ アルギニン

タンパク質を構成する20種類のアミノ酸の内のひとつで、中でも成長ホルモンの分泌を高める「活力」に重要なアミノ酸です。